

We at healthHcentric, want to ensure the adjustment features of your chair are easily understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

Call us if you have any questions and ask for a customer support representative.

Chez healthHcentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Si vous avez des questions, appelez-nous et demandez à parler avec un représentant du service à la clientèle.

healthHcentric™

ph/tél.: 1 866 438-3746

fx/télec.: 1 800 848-5190

service@healthcentric.com

healthcentric.com



Adjustability understood™

To get the most out of your chair, please take a minute to learn about its adjustment features.

La maîtrise des ajustements™

Pour utiliser au mieux votre chaise, veuillez prendre une minute pour en apprendre davantage sur ses réglages.


Read this user guide

Lisez ce guide

Upholstered Sit Stand / Tabouret assis-debout

healthHcentric™
medical grade seating

Top View
Vue aérienne

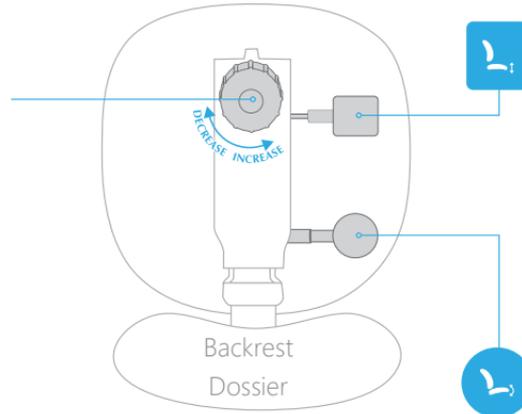

SPRING TENSION: To adjust the spring tension, turn the knob under the front of the seat as indicated in the diagram. The proper spring tension is important for comfort and safety.

TENSION DU RESSORT: Pour régler la tension du ressort, tournez la poignée située sous le devant de la chaise tel qu'indiqué sur le schéma. Il est important que la tension soit adéquate pour le confort et la sécurité.

SEAT HEIGHT: To raise the seat, pull up on the **SQUARE** paddle while raising your weight on the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

HAUTEUR DU SIÈGE : Pour monter le siège, tirez sur la manette **CARRÉ** tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.

SEAT ANGLE / FREE FLOAT: To adjust the seat angle, pull up on the **CIRCULAR** paddle and shift your weight forward or backward until the seat is at the desired angle. Push this paddle down to lock. To free float the chair, pull this paddle all the way up and leave it in the up position.

ANGLE DU SIÈGE / MODE FLOTTANT : Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette **CIRCULAIRE** et déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière pour faire bouger le siège vers l'angle désiré. Poussez la manette vers le bas pour bloquer l'angle. Pour passer en mode flottant, tirez la manette complètement vers le haut et laissez-la dans cette position.